

FORA[®] Aplicación iFORA Diabetes Manager

**** Si el idioma del teléfono celular está configurado en español, la aplicación mostrará la interfaz en español.**

Empezando

- 1 Descargue e instale la última versión de "iFORA Diabetes Manager".




- 2 Asegúrese de que Bluetooth esté activado en la configuración de su teléfono móvil.

- 3 Lea los términos y condiciones, luego marque la casilla junto a "Acepto" y presione "OK".




Emparejar su dispositivo

- 1 Mantenga presionado por 5 segundos el botón de Bluetooth localizado en el lado derecho del medidor hasta que el indicador de Bluetooth de su medidor comience a parpadear azul.

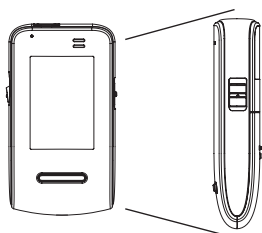

Botón de Bluetooth


- 3 Este dispositivo se agregará a la lista de 'medidores disponibles'.

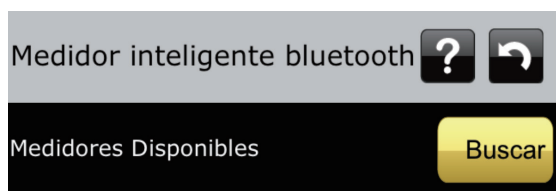

TNG VOICE

Borrar

- 2 Desde la aplicación de su teléfono, seleccione 'Agregar' para emparejar el medidor TN'G Voice.

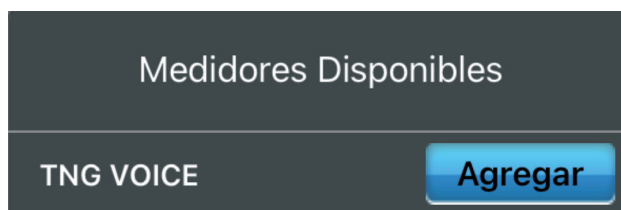


- 4 Presione la flecha hacia atrás para salir de la página del Medidor inteligente Bluetooth. Cuando salga el mensaje en la pantalla, "Guardar y salir?", presione 'Sí'. Si existen datos en su medidor, los datos se importarán automáticamente.




Subiendo datos al servicio de telesalud


- 1 Inicie iFORA Diabetes Manager. Vaya al icono de configuración y busque la página "Servicio de TeSalud".

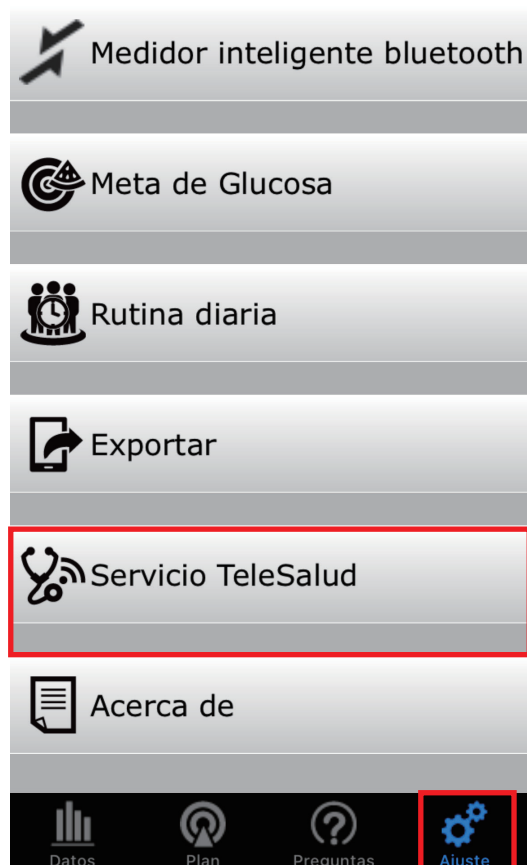

- 2 Seleccione "ForaCare US" de la lista bajo "Elija su Servicio de Telesalud".

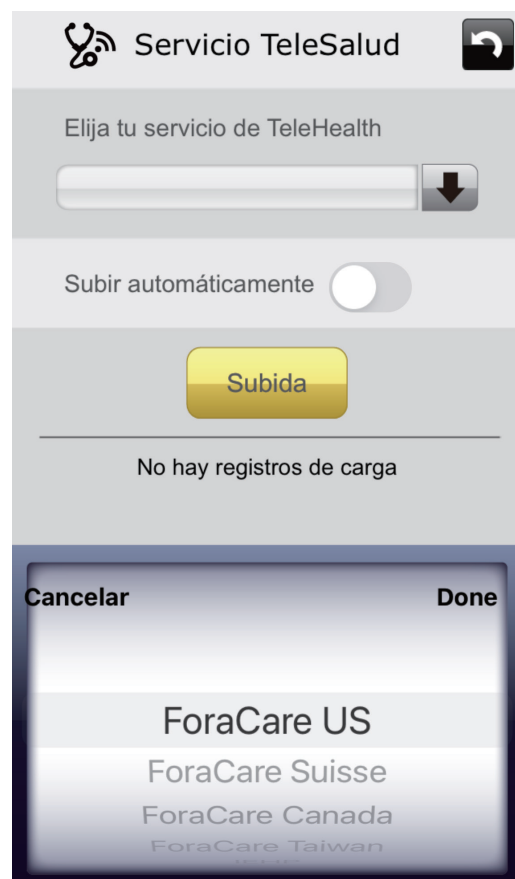

- 3 Active "Cargar automáticamente" para enviar automáticamente los datos al servicio de telesalud.

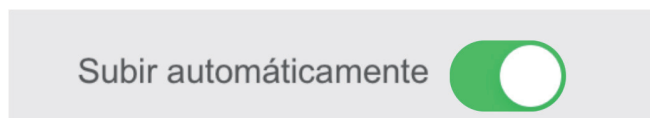

- 4 Presione el botón Atrás para salir y, cuando se le solicite guardar, presione "Sí". Los datos se cargarán automáticamente cada vez que su dispositivo FORA se sincronice con la aplicación.