





Please follow the cleaning instructions to clean your device after each use.

Siga las instrucciones de limpieza para limpiar su dispositivo después de cada uso.

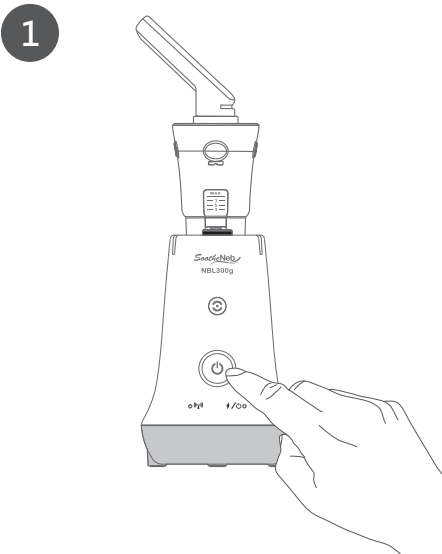


1 Turn off the main unit.

Apague la unidad principal.

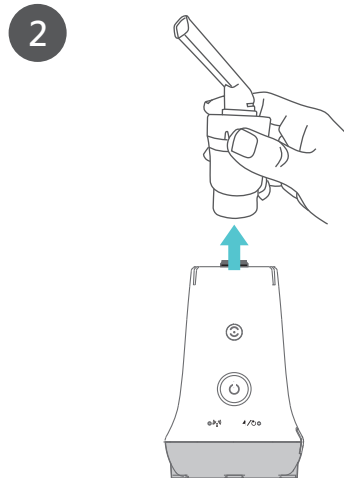

2 Pull out the nebulizer kit from the main unit.

Extraiga el kit del nebulizador de la unidad principal.

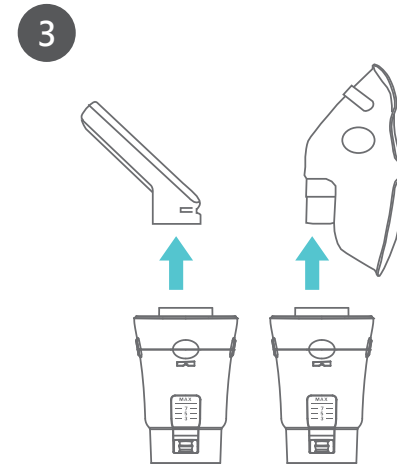


3 Pull out the mouthpiece / mask from the nebulizer kit.

Extraiga la boquilla/máscara del kit del nebulizador.




4 Turn counterclockwise.

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

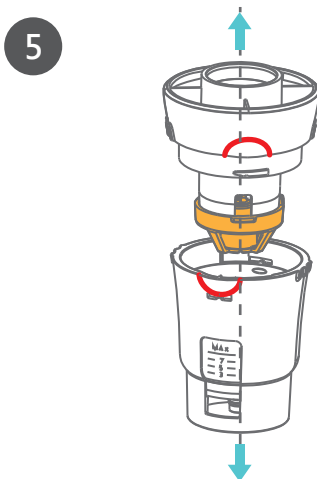


5 Depart the cap with spray nozzle from the medicine cup.

Saque la tapa con la boquilla de pulverización del taza del medicamento.

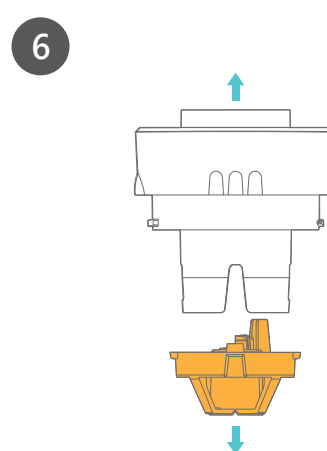

6 Detach the spray nozzle from the cap.

Saque la boquilla de pulverización del la tapa.

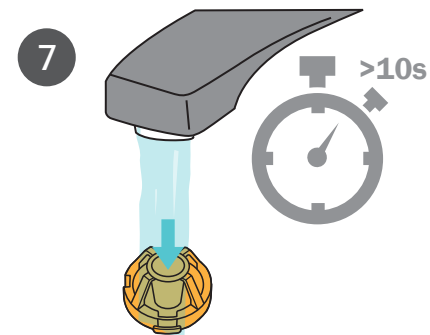

7 Rinse the mouthpiece, medicine cup, spray nozzle and cap thoroughly with running water at least 10 seconds. **Especially for the spray nozzle, make sure to flush the opening (as the arrow indicates) to clean out the residue.**


Enjuague bien la boquilla, el recipiente para el medicamento, la boquilla pulverizadora y el tapón con agua corriente durante al menos 10 segundos. **Especialmente en el caso de la boquilla pulverizadora, asegúrese de enjuagar la abertura (como indica la flecha) para limpiar los residuos.**

8



If the spray nozzle, mouthpiece, cap and medicine cup are still in severe obstruction or dirty, **immerse them in water for at least 15 minutes first**, and then rinse them with running water for at least 10 seconds again (as in 7).

Si la boquilla pulverizadora, la boquilla, el tapón y el recipiente para el medicamento siguen muy obstruidos o sucios, **sumérjalos primero en agua durante al menos 15 minutos** y, a continuación, vuelva a enjuagarlos con agua corriente durante al menos 10 segundos (como en 7).

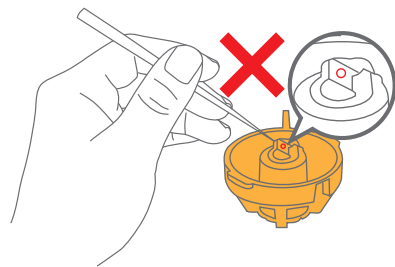

### WARNING

NEVER clean out the clog in the gap with sharp objects.

\*Once the spray nozzle, mouthpiece, cap and medicine cup are severely clogged and cannot be cleaned, replace them with new ones.

### ADVERTENCIA

NUNCA limpie el atasco en el hueco con objetos afilados.

\*Una vez que la boquilla pulverizadora, la boquilla, el tapón y el taza del medicamento estén muy obstruidos y no puedan limpiarse, sustitúyalos por otros nuevos.


9



Shake off excess water and let them air dry.


Sacuda el exceso de agua y deje secar al aire.

10

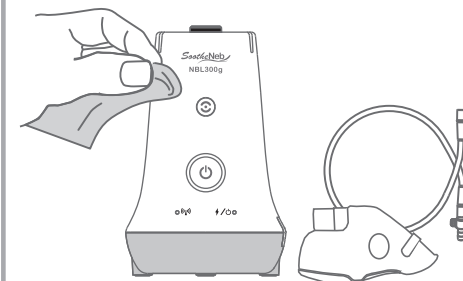

Wipe the mask, air hose, and the outer casing of the main unit with a clean cloth.

Utilice un paño limpio para limpiar la mascarilla, la tubo de aire y la carcasa exterior de la unidad principal.

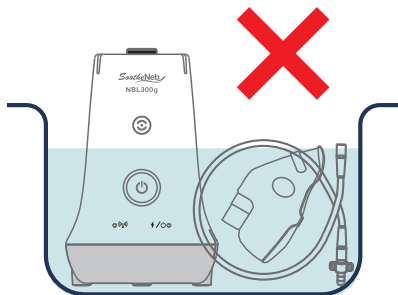

### WARNING

NEVER immerse the mask, air hose and the main unit in the water.

### ADVERTENCIA

NUNCA sumerja la máscara, la tubo de aire y la unidad principal en agua.

**SootheNeb**

Distributed by ForaCare, Inc.  
893 Patriot Drive Suite D  
Moorpark, CA 93021 USA  
Products made in Taiwan  
Toll Free: 1-888-307-8188  
(6:30 am-5:30 pm PST, Mon.-Fri.)  
For assistance outside of these hours,  
please contact your healthcare professional.  
[www.foracare.com](http://www.foracare.com)

Distribuido por ForaCare, Inc.  
893 Patriot Drive Suite D  
Moorpark, CA 93021 USA  
Productos fabricados en Taiwán  
Nº gratuito: 1-888-307-8188  
(6:30 am-5:30 pm PST, Lunes a Viernes).  
Para obtener asistencia fuera de estos  
horarios, póngase en contacto con el  
profesional de la salud.  
[www.foracare.com](http://www.foracare.com)