

NBL300b
Compressor Nebulizer /
Compresor Nebulizador

**Quick Start Guide /
Guía de inicio rápido**

(For Bluetooth Pairing /
para el emparejamiento Bluetooth)



**New Users /
Usuarios nuevos**

Those who are downloading
this app for the first time. /
Aquellos que descargan esta
aplicación por primera vez.

Distributed by **ForaCare, Inc.** / *Distribuido por
ForaCare, Inc.*
893 Patriot Drive Suite D, Moorpark, CA 93021 USA
**Products made in Taiwan / Productos hecho en
Taiwan**
**Toll Free / Número de Teléfono Gratuito:
1-888-307-8188**
(6:30 am-5:30 pm PST, Monday-Friday /
6:30 am-5:30 pm PST, Lunes a Viernes)
For assistance outside of these hours, please contact
your healthcare professional.
/ Para obtener asistencia fuera de estos horarios,
póngase en contacto con el profesional de la salud.
www.foracare.com

1

Download on the **App Store** | **GET IT ON Google Play**

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Search for **iFORA Smart**

Tap the **iFORA Smart** app icon.

2

Turn on **Bluetooth** on your smartphone.

3

Open the **iFORA Smart** app and go to **Settings**.

Turn on **NEBULIZER** and **SPIROMETRY**.

4

Tap the **Bluetooth** icon in the app to start pairing.

5

Press the **Bluetooth** button on the nebulizer device.

5" (5-second timer icon)

6

Press the **Bluetooth** button on the nebulizer device.

Bluetooth icon

7

Tap the **Bluetooth** icon in the app.

8

Tap **Bluetooth Pairing** in the app settings.

9

Tap **Search** in the **Bluetooth Smart Meter** section.

Tap **SootheNeb NBL300** in the **Available Meters** list.

10

Tap **Save and Import?** and select **Yes**.

11

Tap **Import** in the **Import** dialog box.



NBL300b
Compressor Nebulizer /
Compresor Nebulizador

**Quick Start Guide /
Guía de inicio rápido**

(For Bluetooth Pairing /
para el emparejamiento Bluetooth)



**Repeat Users /
Usuarios habituales**

Those who have downloaded
and paired this app with other
FORA devices. /
Aquellos que han descargado
y emparejado esta aplicación
con otros dispositivos FORA.

**Distributed by Foracare, Inc. / Distribuido por
Foracare, Inc.**
893 Patriot Drive Suite D, Moorpark, CA 93021 USA
**Products made in Taiwan / Productos hecho en
Taiwan**
Toll Free / Número de Teléfono Gratuito:
1-888-307-8188
(6:30 am-5:30 pm PST, Monday-Friday /
6:30 am-5:30 pm PST, Lunes a Viernes)
For assistance outside of these hours, please contact
your healthcare professional.
/ Para obtener asistencia fuera de estos horarios,
póngase en contacto con el profesional de la salud.
www.foracare.com


1





Apple and the Apple logo are
trademarks of Apple Inc.





Google Play and the Google Play
logo are trademarks of Google LLC.

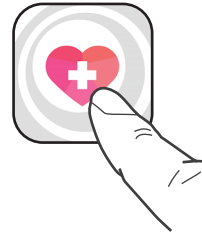




2

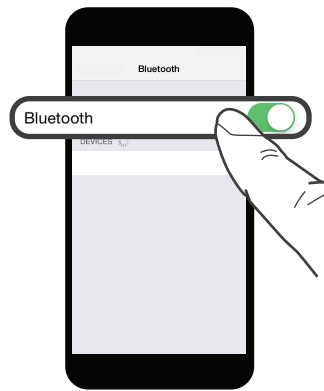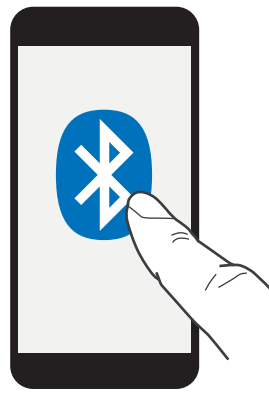



3

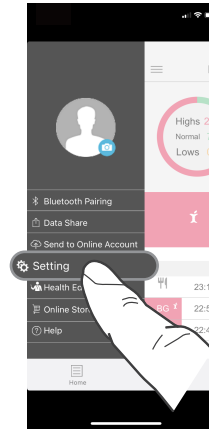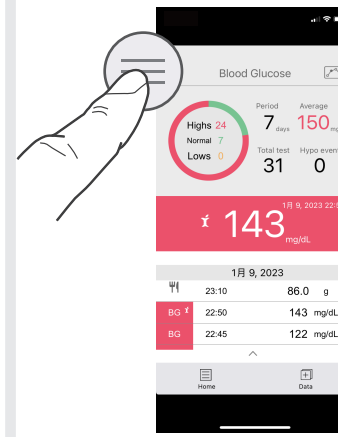

4

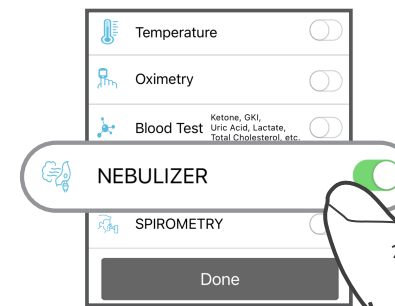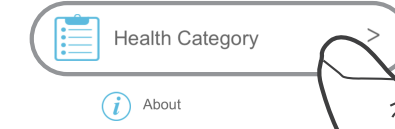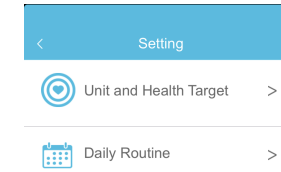



5

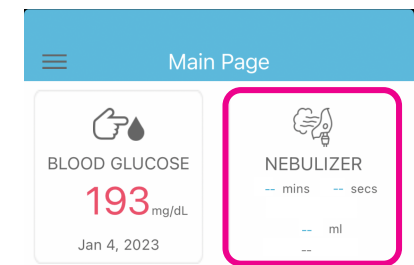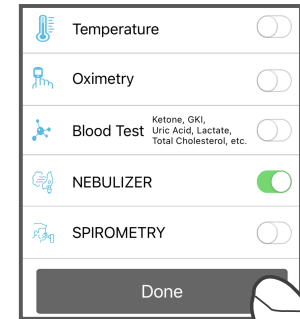



6





7

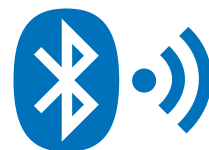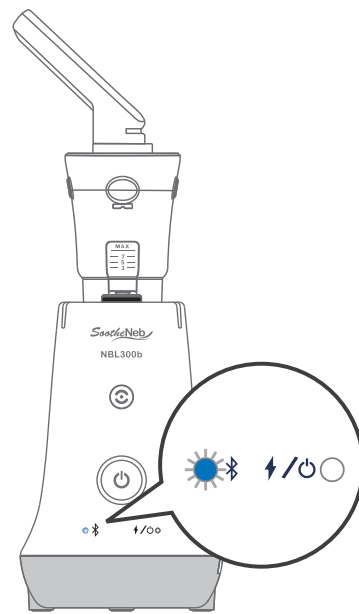



8

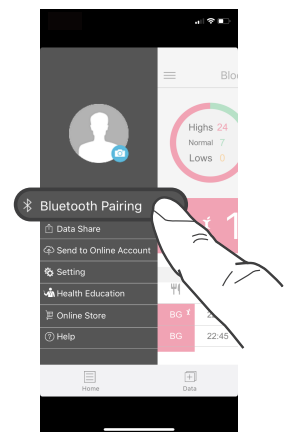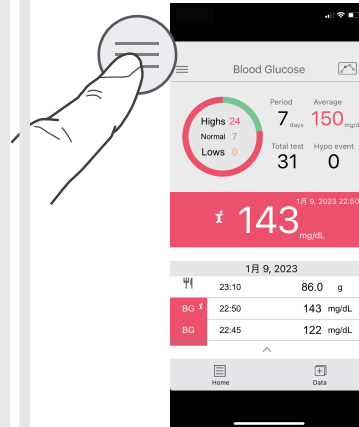

9

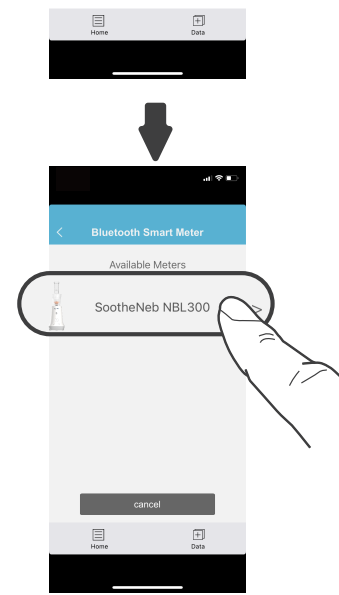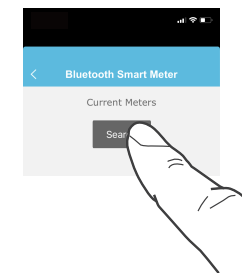

10

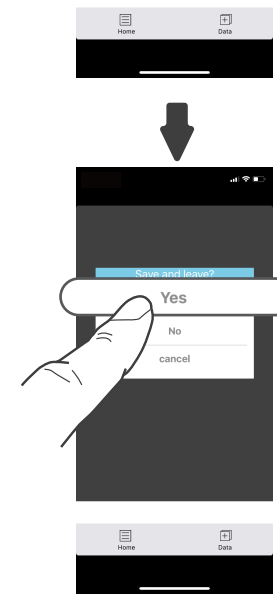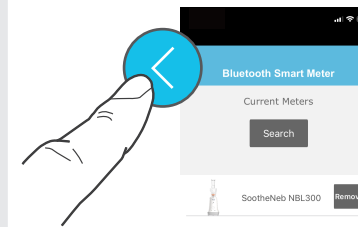

11

